

IIEF-EF Bereich

1. Wie oft hatten Sie eine Erektion?
2. Wie oft waren die Erektionen hart genug für eine Penetration?
3. Wie oft waren Sie in der Lage, einzudringen?
4. Wie oft waren Sie in der Lage, die Erektion nach der Penetration aufrechtzuerhalten?
5. Wie schwierig ist es, die Erektion bis zur Vollendung des Aktes aufrechtzuerhalten?
6. Wie beurteilen Sie Ihr Vertrauen in die Fähigkeit, eine Erektion zu bekommen und zu halten?

Jede Frage wird je nach Antwort auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten bewertet.

Der Gesamtwert von max. 30 Punkten bestimmt den ED-Schweregrad des Patienten:

Keine ED:	26-30
Milde ED:	17-25
Moderate ED:	11-16
Schwere ED:	6-10

Ausgangswert gemessen durch mindestens vier Geschlechtsverkehrsversuche vor der Behandlung. Erneute Messung nach 4, 8 und 12 Wochen Behandlung (mindestens vier Geschlechtsverkehrsversuche alle 4 Wochen).

SEP2

Können Sie Ihren Penis einführen?

Antwortmöglichkeit JA/NEIN

% Verbesserung gegenüber

Ausgangswert

SEP3

Hielt Ihre Erektion lang
genug zum Vollzug des
Geschlechtsverkehrs?

Antwortmöglichkeit JA/NEIN

% Verbesserung gegenüber

Ausgangswert


SEP2 Leistung bei den ersten 6 sexuellen Versuchen zu Beginn und bis zur 4. Woche, zwischen 4 und 8 Wochen und zwischen 8 und 12 Wochen

SEP2: Konnten Sie Ihren Penis einführen? (JA/NEIN)



SEP3 Leistung bei den ersten 6 sexuellen Versuchen zu Beginn und bis zur 4. Woche, zwischen 4 und 8 Wochen und zwischen 8 und 12 Wochen

SEP3: Hielt Ihre Erektion lange genug für den Vollzug des Geschlechtsverkehrs? (JA/NEIN)

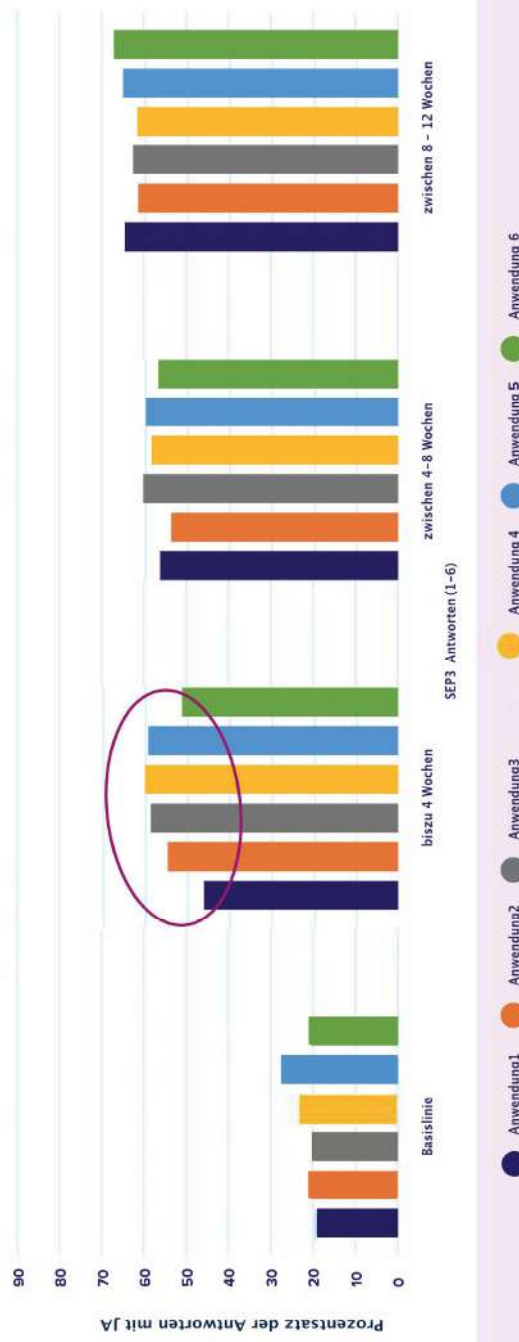



Beide Hauptziele erreicht

- Mittlere IIEF-Veränderung gg.über Ausgangswert nach 24 Wochen
- MCID von mindestens 4 erreicht



Kein Rückgang der Wirksamkeit zwischen 12 und 24 Wochen


Woche	Mittlere IIEF-Veränderung gg.über Ausgangswert
Woche 4	4.59
Woche 8	5.20
Woche 12	5.12
Woche 16	5.83
Woche 20	5.57
Woche 24 – Primärer Endpunkt 1	5.73 (P<0.001)

Mittlere IIEF-EF-Veränderung gg.über Ausgangswert nach 4, 8, 12, 16, 20 und 24 Wochen für Eroxon®



● Basislinie IIEF-EF ● Abweichung von Basislinie IIEF-EF

Eroxon® hat eine verdunstende Wirkung mit flüchtigen Komponenten, die speziell auf die Behandlung von ED zugeschnitten sind

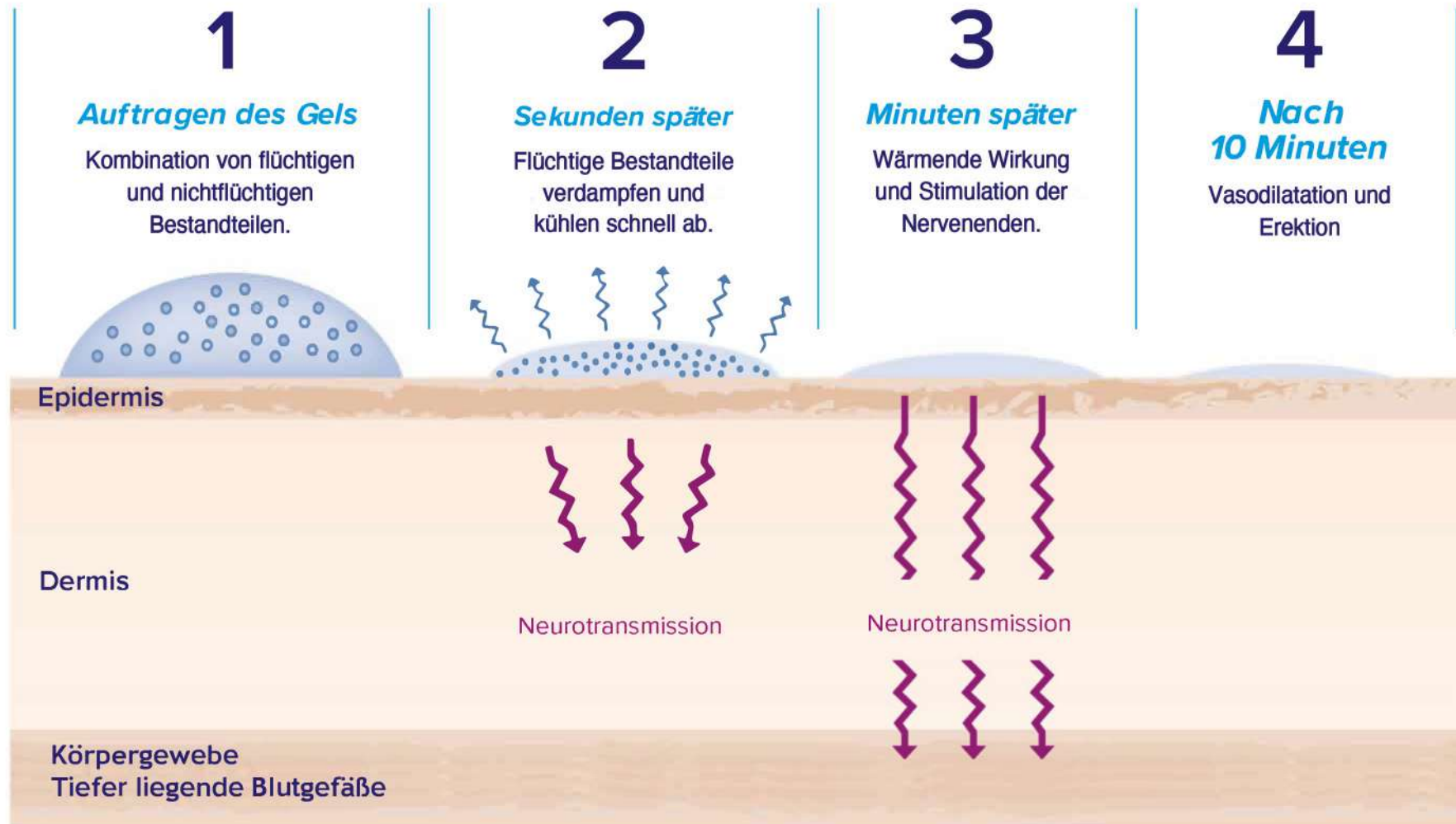

Eroxon® fördert die sensorische Stimulation der Nerven an der Penis-Eichel durch schnelle **Kühlung** und **Wiedererwärmung**, was zu einer **schnellen Entspannung der glatten Muskulatur**, **Gefäßerweiterung** und **Erektion** führt.